

# 新型コロナウイルス〔COVID-19〕 抗原検査キット


# BIOSAI

使用期限 2023.03.05 LOT 2021030703

〔製造元〕 JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.  
〔輸入元〕 株式会社Central Medience  
神奈川県横浜市神奈川区栄町2-9 3階  
info@merecom.jp

## 使用方法

内容物：スワブ（綿棒）、検体希釈液、チューブ、キャップ、テストキット

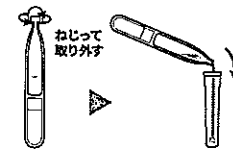

### STEP 1 検体希釈液をチューブに入れる

容器の先端部分をねじって取り外し、中にある検体希釈液を全てチューブの中に移し替えます。



### STEP 2 鼻から検体の採取

スワブを鼻腔に差し込みます。先端が鼻孔入口部から2.5cm程度奥まで届くようにし、両方の鼻腔粘液と細胞がきちんと採取できるよう、粘膜に沿って5回スワブを回転させます。




### STEP 3 希釈液に採取した検体を入れる

スワブをチューブの中に差し込み、液体の中で10秒以上スワブを上下に動かします。その後、スワブをチューブの底に押し当てて5回回し、スワブを取り出します。



### STEP 4 テストキットに検体を注入

ノズルのキャップをしっかりとチューブに差し込みます。テストキットを取り出し、清潔で平らな場所に設置します。チューブを優しく絞り、検体を2~3滴注入します。

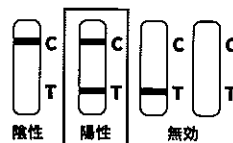

### STEP 5 結果を20分以内に判定

注入後15~20分の間に結果を確認します。

※15分以内だと、正確な判定ができない場合があります。

## ⚠ 使用上の注意

使用期限を確認の上、検査前は手をよく洗ってください。  
検査後のキットは、各自治体の処分方法に従い、処分してください。  
当製品は研究用試薬ですので、新型コロナウイルスの臨床診断目的や治療目的での使用はできません。症状がある場合はPCR検査をお勧めします。